



MASQUE LAVABLE (NON MEDICAL)



1



2



3



4

LE MODE D'EMPLOI

1 - Se laver les mains avant de manipuler son masque. Régler la taille du cordon et déplier le masque.

2 – insérez le filtre dans la poche interne du masque en tissus

3 – positionnez le nez du masque vers le haut, couvrez le menton avec le masque et positionnez le cordon derrière les oreilles.

4 – fixez l'arrête du nez. Il est recommandé de vérifier l'étanchéité à l'air. Couvrez votre masque avec vos mains et expirez, si vous sentez une fuite retournez à l'étape 1 et 3



Nos masques correspondent aux normes : Standard EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Coton de haute qualité norme EN 14632- 1 : 2017, filtration de catégorie 2.

LE LAVAGE

Retirer le filtre avant de laver le masque. Laver le masque à 60° pendant 30 minutes avec un détergent en machine à laver.

Possibilité de laver à l'eau bouillante ou vapeur avec thermomètre. Ne pas utiliser d'alcool ou de javel mais un désinfectant linge autorisé

Idéalement mettre le masque dans un filet pour éviter que la valve ne s'abime dans le tambour.


 il est très important d'appuyer fortement le bord du nez pour former une bonne étanchéité.

 Le filtre PM 2.5 ne peut pas être nettoyé, voir ci-dessous le temps de portage .

 Interdit de l'utiliser pendant le sommeil et aux enfants de moins de 2 ans.

 javel interdit

 un masque stocké dans un endroit poussiéreux perd toute efficacité même si il n'a jamais été utilisé

 si le masque est endommagé ou déchiré, il perd toute efficacité. Il faut donc le changer même si il n'a jamais été utilisé.

MODE D'EMPLOI DU FILTRE

Les filtres ont une durée de vie de 30 heures, ils se changent en moyenne :

- Tous les 5 jours si vous le portez en journée continue
- Tous les 21 jours si vous le portez occasionnellement

RAPPEL DES GESTES BARRIERES CONTRE LE COVID 19



Se laver les mains régulièrement

Tousser ou éternuer dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Porter un masque quand on est malade